

**RÖS'S**  
Tecnología estética avanzada

DEPILPLUS13

## DEPILPLUS 13 MHZ

DEPILACIÓN ELÉCTRICA  
A LA CARTA



**ELIMINACIÓN DEFINITIVA DE VELLO NO DESEADO.**

Depilplus 13MHz es el equipo de electro-estética que ofrece las técnicas más efectivas en depilación eléctrica al profesional de la belleza. Elimina de manera permanente el vello no deseado de áreas localizadas o el vello resistente a la fotodepilación.

**TENEMOS UNA SOLUCIÓN PARA CADA ZONA CORPORAL Y CADA TIPO DE VELLO. ESCOGE LA TUYA.**

**TRATAMIENTOS CORPORALES Y FACIALES**

**DEPILACIÓN FACIAL Y CORPORAL  
PENETRACIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS**

Áreas localizadas



Zonas muy sensibles



Vello resistente



**OPCIONES DE TRATAMIENTO**

| Técnica                                       | Corriente  | Acción               | Beneficio  |
|---|--|----------------------|--|
| <b>Electrólisis</b>                           | Galvánica  | Química              | Gran efectividad   |
| <b>Termólisis</b><br>Soft_termólisis<br>Flash | Radio-frecuencia<br>Potencia mínima<br>Potencia máxima | Térmica              | Mucha rapidez<br>Zonas de sensibilidad media<br>Zonas de sensibilidad alta |
| <b>Blend</b>                                  | Galvánica +<br>Radio-frecuencia                        | Química +<br>Térmica | Efectividad máxima   |
| <b>Sonda Térmica</b>                          | Calor  | Térmica              | Penetración de producto  |
| <b>Sonda Anaforesis</b>                       | Galvánica  | Efecto vasodilatador | Facilita la canalización   |
| <b>Sonda Cataforesis post-depilación</b>      | Galvánica  | Neutralizante        | Regula el PH de la piel  |

- Depilplus 13MHz dispone de programas pre-diseñados y posibilidad de personalizarlos en tipo de emisión, intensidad y tiempo.
- Emisión de aire ozonizado seco en el porta-agujas de efecto bactericida y sedante.
- Regulador de potencia y temporizador.
- Control de emisión mediante pedal.

**ELECTRÓLISIS**

Dstrucción de partes vitales del folículo piloso aprovechando la acción cáustica y química de la corriente galvánica.

**TERMÓLISIS**

Emisión de radio-frecuencia, que transformada en calor, calienta lo suficiente el tejido como para provocar la cauterización de la raíz del vello tratado.

**SOFT-TERMÓLISIS:** descarga con la mínima potencia en un tiempo regulable.

**FLASH:** descarga de gran potencia en centésimas de segundo.

**SISTEMA BLEND**

Termólisis y electrólisis aplicados de manera simultánea. El calor de la radio-frecuencia, potencia el efecto cáustico de la electrólisis. Eficacia y rapidez máximos para una eliminación definitiva del vello.

**SONDA TÉRMICA**

Técnica de depilación termoquímica mediante sonda. Su aplicación con producto químico persigue la degeneración progresiva y la atrofia de las células germinales del vello, hasta su total desaparición. La sonda de calor favorece la penetración y eficacia del producto.

**SONDA DE ANAFORESIS**

Sonda para abrir poros antes de la canalización de la aguja. También apropiada para penetrar principios activos mediante ionización.

**SONDA DE CATAFORESIS**

Sonda para relajar la piel y disminuir el enrojecimiento propio de la depilación. Regula el pH cutáneo para finalizar el tratamiento.



Programas personalizables



Sonda para preparación de la piel pre y post depilación



RÖS'S Estética es fabricante europeo de tecnología estética profesional desde 1978. Su misión es compartir con I@s profesionales de la belleza las soluciones más innovadoras y eficientes en aparatología estética. Los objetivos de nuestra marca son aportar valor y ofrecer servicio continuado.

Ponemos a tu disposición todos nuestros valores:

- I Conocimiento y experiencia
- I Plan de formación y acompañamiento médico
- I Garantía de fabricación europea
- I Servicio post-venta

En RÖS'S estamos al lado del emprendedor@ para acompañarle en su crecimiento. Todo nuestro equipo de profesionales, departamento médico-estético, comercial, marketing y técnico se encuentra a su disposición.


RÖS'S, vocación de servicio

#### DEPILPLUS 13 MHZ

Ref. 0028600

|                                 |              |            |
|---------------------------------|--------------|------------|
| DIMENSIONES                     | Ancho        | 490 mm     |
|                                 | Alto sin pie | 180 mm     |
|                                 | Fondo        | 280 mm     |
|                                 | Peso         | 5 kg       |
| Pie Beta (optativo) REF.0077220 |              | 790x450 mm |
| CONSUMO                         |              | 450mA      |
| FRECUENCIA                      |              | 50Hz       |
| POTENCIA                        |              | 105W       |

| CÓDIGO  | ACCESORIO                      | CANTIDAD |
|---------|--------------------------------|----------|
| 0401700 | Pedal DIN                      | 1        |
| 040181* | Porta-agujas                   | 1        |
| 040182* | Sonda calor                    | 1        |
| 0407301 | Caja aguja recta inox. 50 und. | 1        |
| 0407300 | Caja aguja curva inox. 50 und. | 1        |
| 3306140 | Cable de retorno negro         | 1        |
| 4006909 | Electrodo de retorno           | 1        |

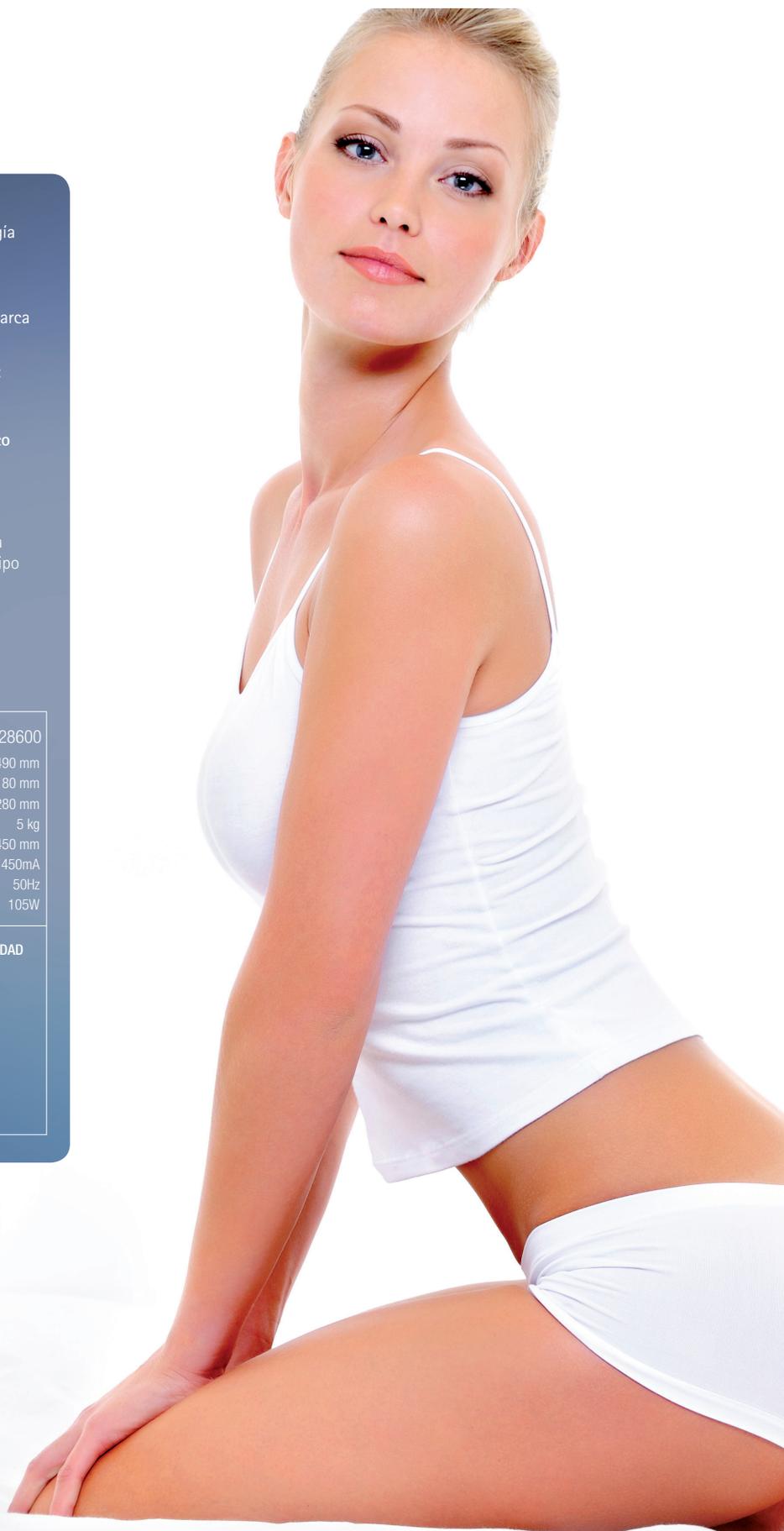

RÖS'S ESTETICA, Molinot, 46-48 · 08860 Castelldefels (Barcelona) · email:ross@ross.es · TEL. (34) 93 4266017 · www.ross.es

# RÖS'S

Tecnología estética avanzada