



Penetración
de activos



Desinfección



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
Reafirmación



**MALETÍN
PROFESIONAL
DE TRATAMIENTOS
FACIALES**

BASICFACE
MALETÍN DE TRATAMIENTOS FACIALES

RÖS'S
Tecnología estética avanzada



Desinfección, tratamiento y reafirmación en rostro, cuello y escote.

Ligero y completo maletín de tratamientos faciales profesionales de uso imprescindible en cabina. Funcional, intuitivo y transportable.

- **Función 1:** Desinfección con Alta Frecuencia (AF).
- **Función 2:** Termoterapia mediante sonda de calor.
- **Función 3:** Penetración de principios activos ionizables.
- **Función 4:** Reafirmación dérmica y muscular gracias al electrolifting.



Técnicas Basic Face

Alta frecuencia

La aplicación de alta frecuencia sobre la piel provoca una vasodilatación como consecuencia de su efecto térmico. Además, es un potente descongestivo, bactericida y antiséptico, muy recomendado para preparar la piel antes de un tratamiento facial.

Termoterapia

Mediante la sonda de calor aumentamos la circulación sanguínea local, acelerando la oxigenación y nutrición de los tejidos. Además, gracias a su acción térmica, la permeabilidad de la membrana celular se incrementa, favoreciendo así la penetración de principios activos.

Ionización

Penetración de principios activos mediante corriente galvánica. Eficacia probada en estética y medicina estética.

Electrolifting

Aplicación de micro-corrientes variables de baja frecuencia para el levantamiento de los estratos más superficiales de la piel. Su efecto previene el envejecimiento cutáneo.

DIMENSIONES			
Ancho	330 mm	Alto	100 mm
		Fondo	250 mm
PESO			2,9 kg
CONSUMO			100W
CÓDIGO	ACCESORIOS	CANTIDAD	
040182*	Sonda de calor	1	
0405903	Electrodo lifting	2	
3700900	Electrodo AF	1	
4000700	Electrodo retorno	1	
0403110	Mango porta electrodos	1	
3306140	Cable negro	3	



rossbcn